

DENTAID

Oral health. Better life.

PRODUCTOVERZICHT



DENTAID

Oral health. Better life.

Een passend borsteltje voor iedere interdentale ruimte

Interdentale borsteltjes zijn het meest effectieve hulpmiddel en 1e keuze device voor interdentale reiniging.



**60%
TANDENPOETSEN**



Met tandenpoetsen alleen wordt 60% van het tandoppervlak gereinigd.



**40%
INTERDENTAAL REINIGEN**

Geaccumuleerde tandplaque in de interdentale ruimte kan bijdragen aan het ontstaan van diverse mondproblemen.

De **mesiale** en **distale** zijden zijn niet toegankelijk voor een tandenborstel. De interdentale ruimte is **anatomisch** gevormd. Een interdentaal borsteltje is het meest effectief in het reinigen van de interdentale ruimte. Ook bij parodontitis of tandvleesproblemen is reinigen met borsteltjes het meest effectief op de belangrijkste parameters. Zolang de interdentale ruimte opgevuld en beschermd is met een gezonde papil, is het niet nodig om interdentaal te reinigen. Echter, wanneer de interdentale ruimte onvoldoende wordt opgevuld door een papil, kan een biofilm zich op de interproximale oppervlakken vormen. Een passend interdentaal borsteltje met de juiste borstelvorm is essentieel om de biofilm te verwijderen.

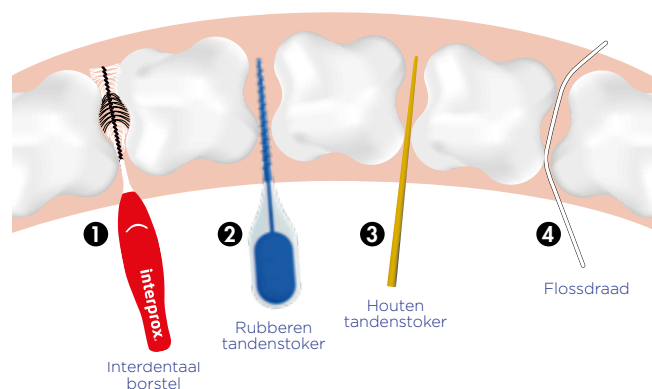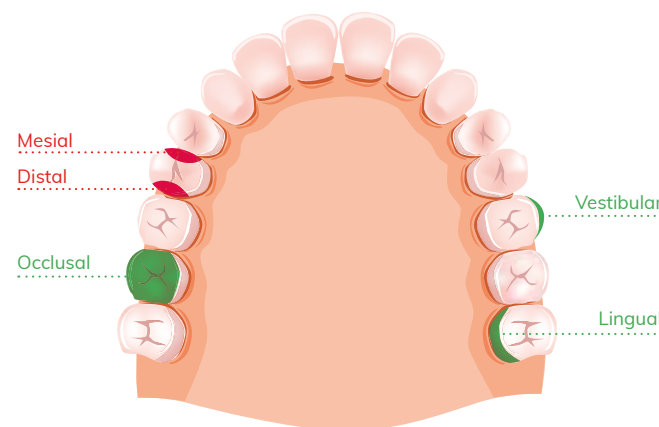

1. Interdentaal borsteltje

Als aanvulling op het tandenpoetsen verwijderen interdentaal borstels meer tandplaque dan bij uitsluitend tandenpoetsen. Het gebruik van interdentaal borstels heeft een significant positief effect op plaquescores, bloeding bij sonderen en pocketdiepte.

Slot D.E. et al. The efficacy of interdental brushes on plaque and parameters of periodontal inflammation: a systematic review: a systematic review: Int. J. Dent. Hygiene: 2008; 6: 253-264

3. Houten tandenstoker

Het gebruik van tandenstokers heeft geen additioneel effect op de zichtbare plaque en gingivitis index. Er is wel een waarneembaar effect op de bloedingsneiging.

Hoenderdos N.L. et al. The efficacy of woodsticks on plaque and gingival inflammation: a systematic review: Int. J. Dent. Hygiene: 2008; 6: 265-279

2. Rubberen tandenstoker

Een rubberen tandenstoker wordt hoog gewaardeerd door patiënten door het comfort en gemak en vertoont een hoge therapietrouw van de patiënt, waarschijnlijk als gevolg van de zachte structuur.

Van der Weijden et al; The efficacy of a rubber bristles interdental cleaner on parameters of oral soft tissue health - a systematic review; Int J Dent Hyg, 2022 Feb;20(1):26-39. doi: 10.1111/idxh.12492. Epub 2021 May 29

4. Flossdraad

Het routinematig instrueren van het gebruik van floss biedt op basis van dit review geen toegevoegde waarde op plaque-reductie en gingivitis.

Berchier C.E. et al. The efficacy of dental floss in addition to a toothbrush on plaque and parameters of gingival inflammation: a systematic review: Int. J. Dent. Hygiene: 2008; 6: 280-289

Bij middelgrote en grote interdentale ruimten kan een cilindrische borstelvorm beschadigen aan de gingiva en papil veroorzaken. Dit als gevolg van **overdruk** op de gingiva die ontstaat tijdens het inbrengen van het borsteltje in de interdentale ruimte. **De inbrengkracht bij cilindrische borsteltjes neemt toe naarmate de borsteldiameter toeneemt.**



CYLINDRISCHE VORM

zorgt voor optimale precisie in **kleine** interdentale ruimten.



CONISCHE VORM

zorgt voor een betere toegankelijkheid in **middelgrote** en **grote** interdentale ruimten. Veilig voor de gingiva.



INTERPROX DE VOORDELEN

- Compleet assortiment op basis van PHD met 18 verschillende borsteltjes.
- Gebruiksvriendelijk door praktisch handvat.
- Reiniging vanuit palatinale zijde goed mogelijk.
- Flexibel en gecoat ijzerdraadje ter voorkoming van beschadiging van de elementen.
- Zwarte Tynex borstelhaartjes voor het zichtbaar maken van tandplaque.
- Witte Tynex borstelhaartjes voor het zichtbaar maken van bloeding.
- Beschermkapje om het borsteltje hygiënisch op te bergen en mee te nemen.

MEEST COMPLETE ASSORTIMENT OP BASIS VAN PHD



GEL VOOR INTERDENTAAL REINIGEN

Gebruik Interprox Gel in combinatie met de interdentaal borstels om gaatjes en tandvleesproblemen tussen tanden en kiezen te voorkomen. De gel is zeer veilig voor het tandglazuur. Gebruik voor het reinigen van elke interdentale ruimte een nieuwe 'druppel' Interprox Gel.

PERIO-AID

Optimale ondersteuning bij tandvleesaandoeningen en tandheelkundige behandelingen



PERIO-AID

- Bevat Chloorhexidine Digluconaat en Cetylpyridinium Chloride.
- Geschikt voor tijdelijk (0,12% CHX) alsmede langdurig (0,05% CHX) gebruik.
- Ondersteunt de mondhygiëne voor, tijdens en na parodontale en chirurgische behandelingen.
- Ondersteunt de mondhygiëne wanneer poetsen niet goed mogelijk is en voorkomt tandplaquevorming
- Maximale penetratie in de orale biofilm
- Wetenschappelijke basis
- Alcoholvrij; dus mild in de mond.
- Aangenaam van smaak.
- Slechts 30 seconden spoelen per spoelbeurt.

INDICATIES

PERIO-AID Intensive Care (0,12% CHX) is zeer geschikt voor tijdelijk intensieve ondersteuning van de mondhygiëne bij tandvleesaandoeningen en na chirurgische ingrepen.

PERIO-AID Active Control (0,05% Chloorhexidine) is zeer geschikt voor indicaties waarbij langdurige ondersteuning van de mondhygiëne met een laag percentage chloorhexidine wenselijk is. O.a. bij een verlengde ondersteuning na parodontale zorg, bij medisch gecompromitteerde situaties waarbij tevens een adequate tandheelkundige zorg zeer belangrijk is of wanneer goed poetsen lastig is, biedt PERIO-AID Active Control ondersteuning met Chloorhexidine specifiek afgestemd op deze indicaties.

PERIO-AID INTENSIVE CARE MAGNUM OF EASYPACK VOOR PROFESSIONEEL GEBRUIK*



- 0,12% Chloorhexidine Digluconate
- 0,05% Cetylpyridinium Chloride
- 5 liter verpakking voor professioneel gebruik


MAXIMALE VEILIGHEID IN DE TANDHEELKUNDIGE PRAKTIJK

- Voorafgaand aan tandheelkundige behandelingen
- In combinatie met ultrasoon reinigen
- Voor een sterke reductie van de viral en bacterial load

*Alleen verkrijgbaar voor tandheelkundige praktijken en ziekenhuizen.



Maximale ondersteuning van de mondhygiëne met PERIO-AID

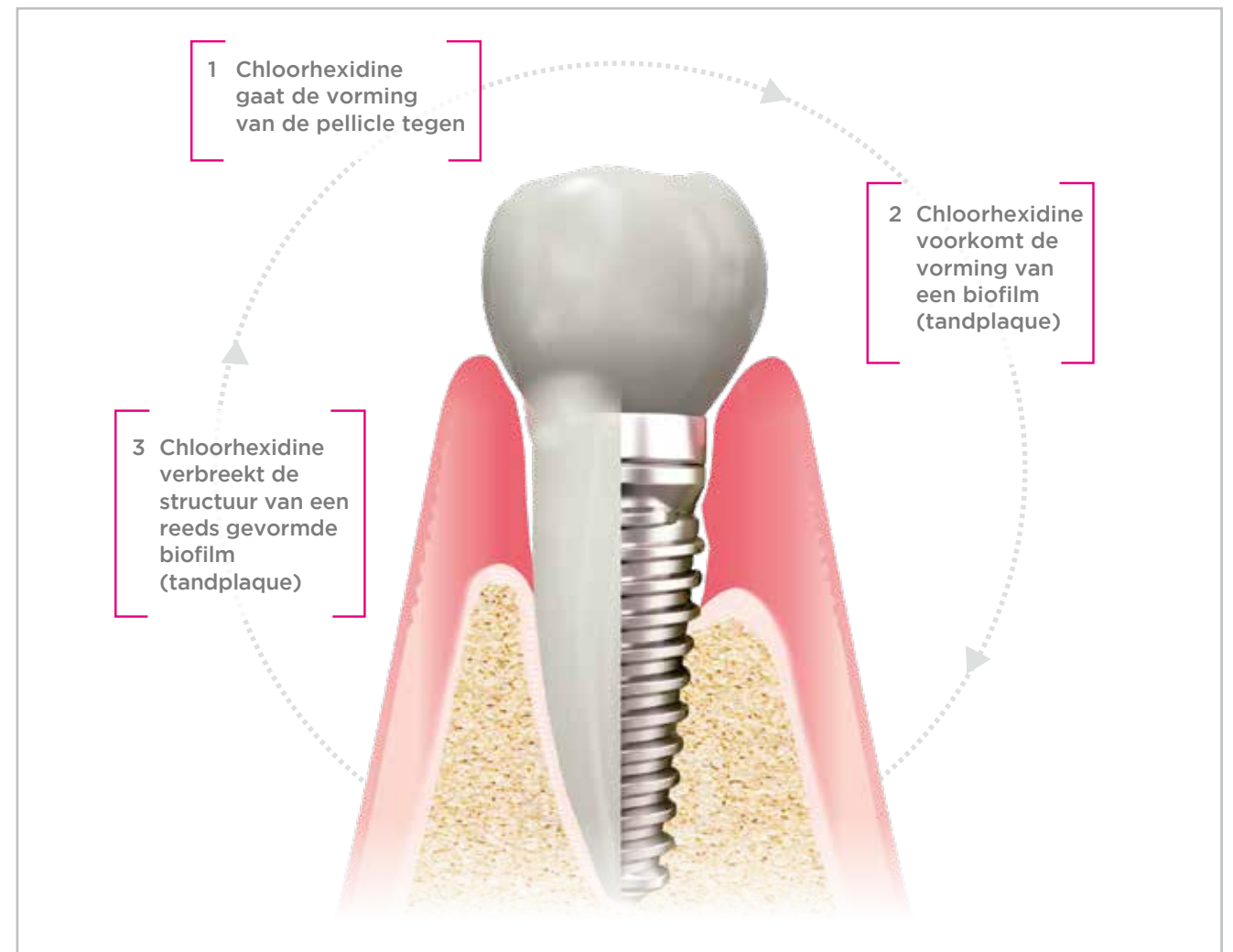

PERIO-AID INTENSIVE CARE MONDSPOELMIDDEL 0,12% Chloorhexidine Digluconate 0,05% Cetylpyridinium Chloride Toepassing: • Voor een superieure ondersteuning van de mondhygiëne waarbij een maximaal effect op verbetering van de conditie van het tandvlees vereist is. • Voor en na tandheelkundige behandelingen. • Wanneer (goed) poetsen niet mogelijk is. • Na het extraheren van tanden en kiezen.	PERIO-AID ACTIVE CONTROL MONDSPOELMIDDEL 0,05% Chloorhexidine Digluconate 0,05% Cetylpyridinium Chloride Toepassing: • Voor een langdurige ondersteuning van de mondhygiëne met een laag percentage Chloorhexidine. • Voor een algehele verbetering van de conditie van het tandvlees. • Na tandheelkundige en parodontale behandelingen. • Wanneer (goed) poetsen niet mogelijk is. • Bij systemisch gecompromitteerde patiënten.	PERIO-AID INTENSIVE CARE GEL-TANDPASTA 0,12% Chloorhexidine Digluconate Toepassing: • Geschikt voor kortdurend én langdurig gebruik als tandpasta en/of in combinatie met (Interprox) interdentaal ragers. • Ondersteuning van de mondhygiëne. • Voor verbetering van de conditie van het tandvlees. • Na tandheelkundige behandelingen. • In combinatie met Perio-Aid Mondspoelmiddel.	PERIO-AID INTENSIVE CARE MONDSPRAY 0,12% Chloorhexidine Digluconate 0,05% Cetylpyridinium Chloride Toepassing: • Geschikt voor lokale toepassing of wanneer spoelen met Chloorhexidine niet mogelijk is. • Ter ondersteuning van de mondhygiëne. • Voor en na tandheelkundige behandelingen. • Wanneer (goed) poetsen niet mogelijk is.	VITIS ANTI-STAIN TANDPASTA 2 Fosfaten 2% PVP 0,4% Sodium Lauryl Sulfate 1.450 Natriumfluoride 1% Xylitol Advies: • Dagelijks gebruik • 2x per dag zorgvuldig poetsen of na elke maaltijd • Poets in combinatie met de VITIS Surgical tandenborstel
---	---	--	---	---

VITIS[®]

anti-stain





Voorkomt
verkleuringen door
chloorhexidinegebruik,
mild voor het
tandvlees.

VITIS ANTI-STAIN

VITIS Anti-stain is speciaal ontwikkeld om verkleuringen te voorkomen tijdens een antiseptische behandeling. Antiseptica, zoals Chloorhexidine, kunnen verkleuringen veroorzaken. VITIS Anti-stain voorkomt verkleuringen, is mild voor het tandvlees en vertraagt en voorkomt kristallisatie van tandplaque (orale biofilm). Daarbij bevat VITIS Anti-stain 1.450 ppm Natriumfluoride en is geschikt voor dagelijks gebruik.

BIJWERKING VAN CHLOORHEXIDINE

De aanwezigheid van tandplaque en/of het gebruik van bepaalde chromogene voedingsmiddelen (bijvoorbeeld koffie, thee, rode wijn, bessen) of tabak tijdens het gebruik van Chloorhexidine kan leiden tot verkleuringen. Chloorhexidine adsorbeert kleurstoffen en pigmenten uit deze chromogene voedingsmiddelen en bindt deze aan het tandoppervlak. Dit leidt tot verkleuringen als gevolg van Chloorhexidinegebruik. Om deze reden kunnen patiënten besluiten om voortijdig te stoppen met het gebruik van Chloorhexidine.

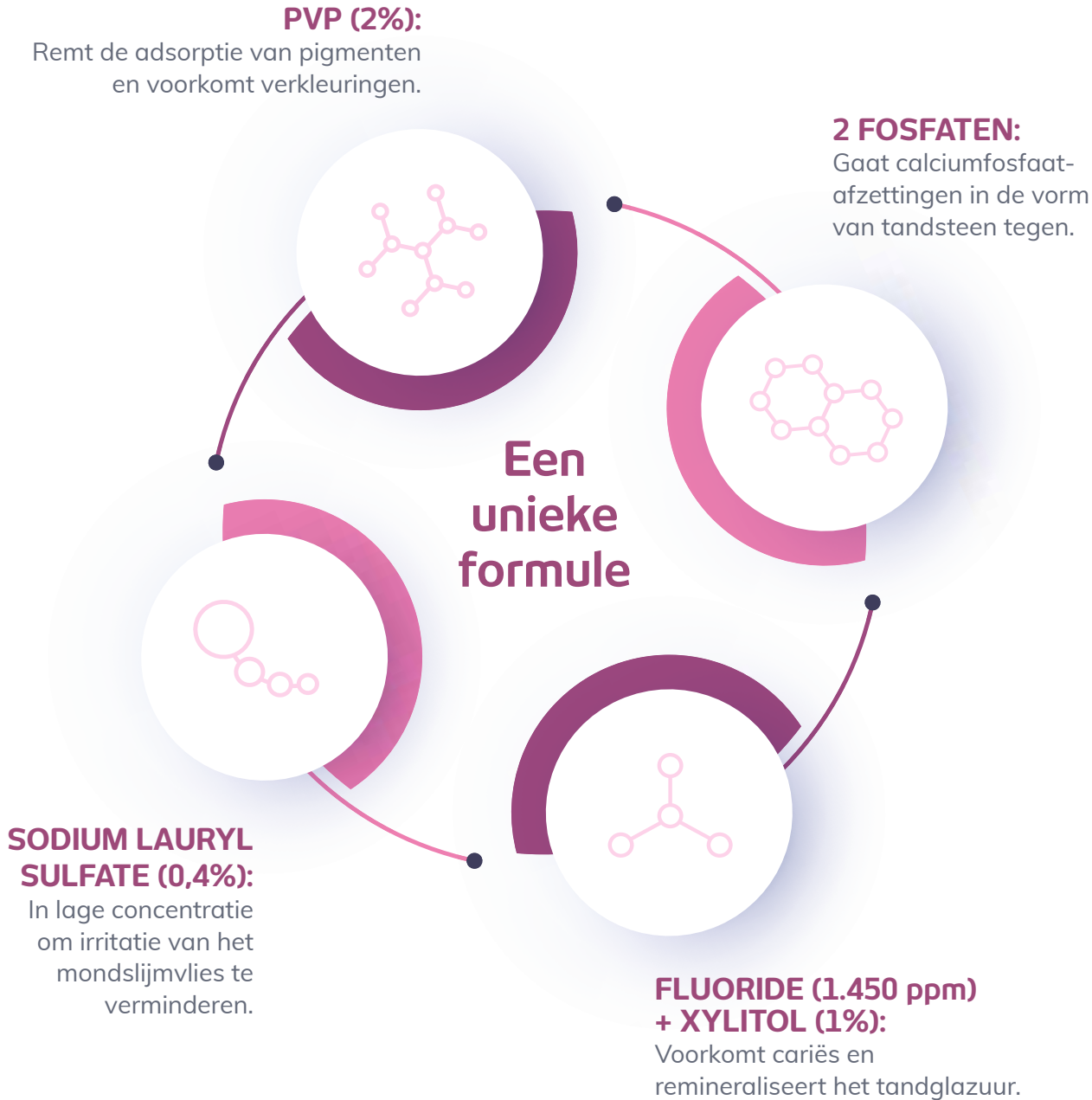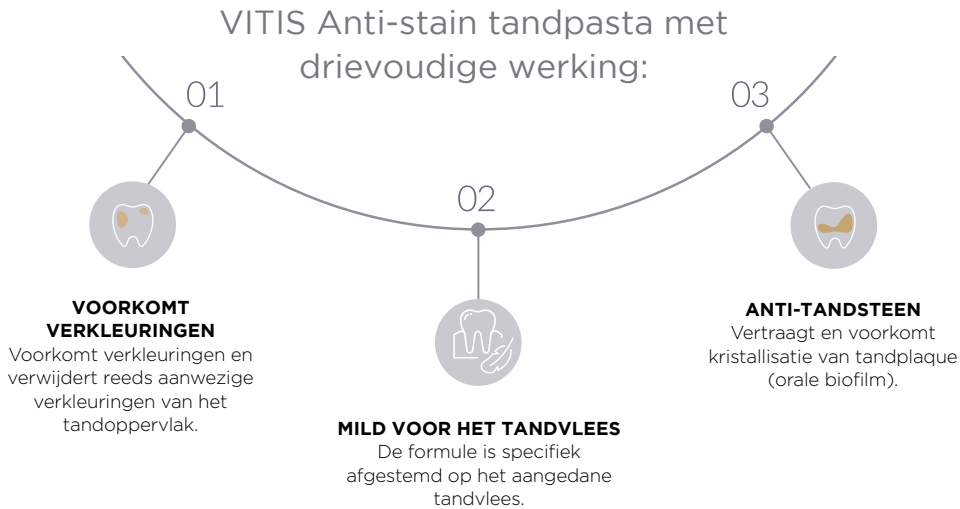

VITIS ANTI-STAIN
TANDPASTA

Sodium hexametaphosphate	3%
Sodium tripolyphosphate	2%
PVP	2%
Xylitol	1%
Natriumlaurylsulfaat	0,4%
Natriummonofluorofaat	1,1%
	1.450 ppm

- Advies:
- Dagelijks gebruik
 - 2x per dag zorgvuldig poetsen of na elke maaltijd
 - Poets in combinatie met de VITIS surgical tandenborstel



Tip!

Gebruik VITIS Anti-stain in
combinatie met de **VITIS Surgical
tandenborstel** voor een extra zachte
reiniging tijdens de behandeling.



gezond tandvlees

CPC



Dagelijkse verzorging van kwetsbaar tandvlees

Resultaat na 4 dagen. Bewezen in klinisch onderzoek wanneer VITIS Gezond Tandvlees mondspoelmiddel tweemaal daags wordt gebruikt, vermindert het tandplaque effectief in 4 dagen¹.

De meest complete formule voor de verzorging en bescherming van tanden en tandvlees



VITIS® GEZOND TANDVLEES

De VITIS® Gezond Tandvlees producten zijn ontwikkeld om de mondhygiëne dagelijks te ondersteunen. De producten bevatten o.a. de stoffen Cetylpyridinium Chloride en Zink Lactaat die de vorming van tandplaque tegengaan en in combinatie met de stof Panthenol zorgt dit voor een verbetering van de conditie van het tandvlees en de mondhygiëne.

Aanvullend bevatten de VITIS® Gezond Tandvlees producten Natriumfluoride. Op deze manier worden (wortel)cariës voorkomen.

INDICATIES

- Bij gingivitis.
- Na parodontale behandelingen om de mondhygiëne dagelijks te ondersteunen.
- Bij overmatige tandplaquevorming.
- In geval van blootliggende tandhalzen (na tandvleesbehandelingen).


Bij kwetsbare patiënten o.a.:

- Diabetes en immunologische aandoeningen.
- Genetische aanleg parodontitis.
- Zwangerschap en menopauze.
- Chronische stress.
- Ouderen.
- Rokers.

ADVIES

- Dagelijks gebruik
- 2x per dag poetsen en spoelen ter verbetering van de mondhygiëne.
- Combineer voor een optimaal resultaat VITIS® Gezond Tandvlees Tandpasta met VITIS® Gezond Tandvlees Mondspoelmiddel.
- Bevat geen Chloorhexidine.
- Geeft geen verkleuringen of smaakverlies.
- Kan permanent gebruikt worden.

Survival rate (%)

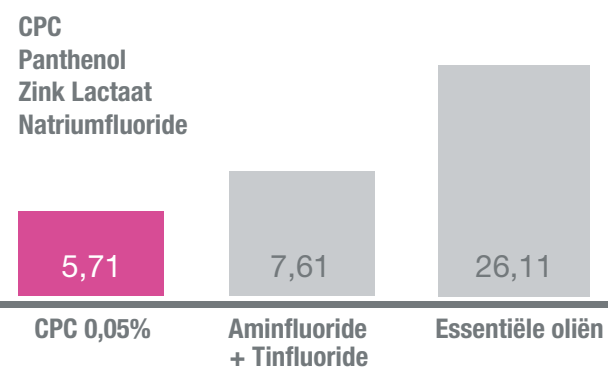

Het CPC mondspoelmiddel liet de beste antimicrobiële werking zien met een overlevingspercentage van slechts 5,7%.

* Demonstrated effectiveness, DENTAID Research Center, 2014.



1. García V, Rioboo M, Serrano J, O'Connor A, Herrera D, Sanz M. Plaque inhibitory effect of a 0,05% cetyl-pyridinium chloride mouth-rinse in a 4-day non-brushing model. Int J Dent Hyg. 2011 Nov;9(4):266-73. doi: 10.1111/j.1601-5037.2010.00490.x. Epub 2010 Nov 5. PMID: 21356025.

ALCOHOL VRIJ



VITIS® GEZOND TANDVLEES MONDSPOELMIDDEL

Cetylpyridinium Chloride (CPC)	0,05%
Panthenol (Provitamine B5)	0,50%
Zink-lactaat	0,14%
Natriumfluoride	0,05%
	225 ppm

Advies:

- 2x per dag spoelen gedurende 30 seconden met 15 ml.
- Niet met water naspoelen.



VITIS® GEZOND TANDVLEES TANDPASTA

Cetylpyridinium Chloride (CPC)	0,05%
Panthenol (Provitamine B5)	1,00%
Zink-lactaat	0,25%
Natriumfluoride	0,32%
	1.450 ppm

Advies:

- 2x per dag poetsen met 1-2 cm tandpasta.



VITIS® GEZOND TANDVLEES TANDENBORSTEL

- Voor dagelijks gebruik.
- Zachte en afgeronde borstelharen
- Geschikte reiniging bij gevoelig en/of ontstoken tandvlees.
- Kleine borstelkop maakt reiniging achter in de mond gemakkelijk.



whitening



Maakt tanden
effectief witter en
beschermt tegen
tanderosie

VITIS® WHITENING

In de loop van de jaren verliezen gebitselementen hun natuurlijke frisse kleur. Dit kan een aantal oorzaken hebben zoals aanslag door kleurstoffen uit drank en voedsel, vorming van tandsteen, aanwezigheid van tandplaque, maar ook door onregelmatigheden van het tandoppervlak. Dagelijks gebruik van VITIS® Whitening geeft de gebitselementen de natuurlijke witheid en glans terug zonder gebruik te maken van peroxiden of andere schurende elementen.

WERKING

VITIS® Whitening Tandpasta en VITIS® Whitening Mondspoelmiddel zijn ontwikkeld met de revolutionaire haprepair technologie op basis van actief hydroxyapatite. Deze technologie geeft samen met de overige bestanddelen een unieke 5-voudige werking:

- Anti-verkleuringen
- Herstellend en witmakend
- Anti-tandsteen
- Versterkend voor het tandglazuur
- Polijstend zonder schuring (alleen de tandpasta geeft deze werking)

ADVIES

- Dagelijks gebruik
- 2x per dag poetsen en spoelen.
- Combineer voor een optimaal resultaat VITIS® Whitening Tandpasta met VITIS® Whitening Mondspoelmiddel.
- Kan permanent gebruikt worden.
- Is 100% veilig, bevat geen peroxiden of schadelijke, schurende ingrediënten.

Voor een effectieve en veilige whitening



De enige whitening formule
met een 5-voudige werking:

- 1 Anti-verkleuringen
- 2 Herstellend en witmakend
- 3 Anti-tandsteen
- 4 Anti-cariës
- 5 Polijstend zonder schuring

De particles actief hydroxyapatite vullen barstjes en onregelmatigheden van het tandoppervlak op waardoor de natuurlijke witheid en glans van tanden en kiezen wordt hersteld. Tegelijkertijd biedt deze technologie bescherming tegen gevoelige tanden. Verwijdert effectief verkleuringen van tanden en kiezen en herstelt de natuurlijk witte kleur.

- Combineer poetsen met VITIS® Whitening Tandpasta met VITIS® Whitening Mondspoelmiddel om de whitening effecten te maximaliseren en te behouden.
- Zeer veilig voor tanden en kiezen door een lage schuringswaarde.

ALCOHOL
VRIJ



VITIS® WHITENING MONDSPOELMIDDEL

Actief hydroxyapatite	0,0125%
Polyvinylpyrrolidone (PVP)	0,66%
3-voudig fosfaat systeem	
Natriummonofluorofosfaat	0,172%
	225 ppm

Advies:

- 2x per dag spoelen gedurende 30 seconden met 15 ml.
- Niet met water naspoelen.



VITIS® WHITENING TANDPASTA

Actief hydroxyapatite	0,45%
Polyvinylpyrrolidone (PVP)	2,00%
3-voudig fosfaat systeem	
Perliet	1,00%
Natriummonofluorofosfaat	1,10%
	1.450 ppm

Advies:

- 2x per dag poetsen met 1-2 cm tandpasta.



VITIS MEDIUM TANDENBORSTEL

- Voor dagelijks gebruik.
- Medium harde filamenten.
- Tynex® borstelharen van hoogwaardige kwaliteit voor een effectieve reiniging.
- Flexibele hals voorkomt dat er teveel druk wordt uitgeoefend op tanden en tandvlees.



sensitive



Vermindert
effectief
gevoelige
tanden

VITIS® SENSITIVE

Gevoelige tanden ontstaan wanneer het tandglazuur op bepaalde plaatsen is verdwenen en dentine “bloot” ligt. Bij het nuttigen van koude of warme dranken, het eten van zoete/zure voedingswaren of tijdens het poetsen van de tanden ontstaan dan pijnklachten.

WERKING

VITIS® Sensitive Tandpasta en VITIS® Sensitive Mondspoelmiddel zijn ontwikkeld met de innovatieve haprepair technologie op basis van Actief hydroxyapatiet. Deze technologie geeft samen met de overige bestanddelen een unieke werking:

- Vormt een beschermende, duurzame laag op de blootliggende dentinetubuli
- Voorkomt de overdracht van de externe stimulus (koude, warmte, zuur en zoet)
- Versterkt het tandglazuur
- Beschermst en verzorgt het tandvlees

VITIS® Sensitive vormt afsluitende depots op het tandoppervlak vanaf het eerste moment van gebruik.


ADVIES

- Gebruik VITIS® Sensitive Tandpasta 2x per dag in plaats van een normale tandpasta.
- Poets hierbij met de zachte VITIS® Sensitive Tandенborstel.
- VITIS® Sensitive Mondspoelmiddel kan 2x daags aanvullend gebruikt worden naast de VITIS® Sensitive Tandpasta voor een nog sneller resultaat.

Dubbele en duurzame werking tegen gevoelige tanden

FYSISCHE WERKING:

De haprepair technologie herstelt en beschermt het tandglazuur en dentineoppervlak. Er wordt een duurzame afsluiting gevormd van de blootliggende dentinetubuli. Deze duurzame coating is zeer effectief tegen gevoelige tanden en is tevens waterbestendig.

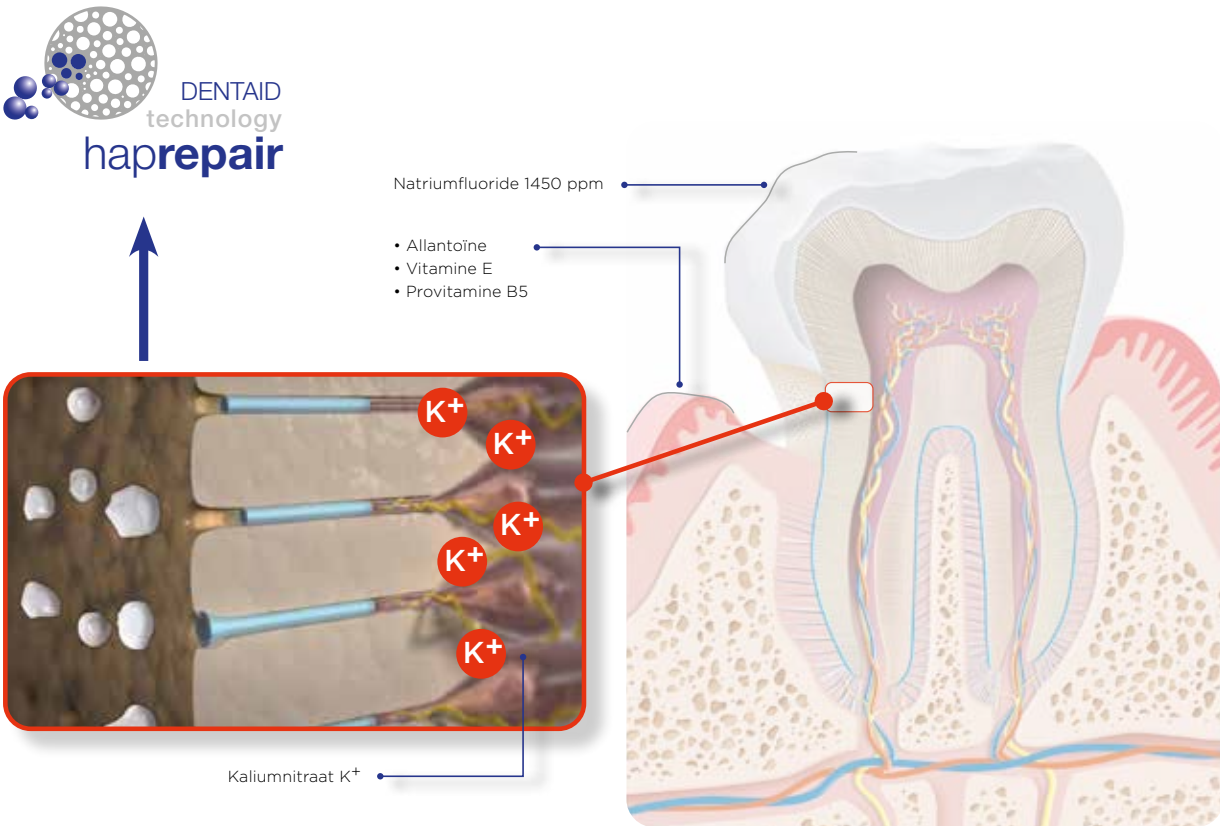

CHEMISCHE WERKING:

De stof Kaliumnitraat voorkomt dat na het optreden van een stimulus tandgevoeligheid kan ontstaan. Kaliumnitraat vormt in de kern van het element een blokkade die beschermt tegen de gevolgen van drukverschillen in de dentinetubuli.

ALCOHOL
VRIJ



VITIS® SENSITIVE
MONDSPOELMIDDEL

Actief hydroxyapatite	0,0125%
Kaliumnitraat	1,00%
Provitamine B5	0,50%
Allantoïne	0,10%
Natriummonofluorofosfaat	0,172%, 225 ppm

Advies:

Aanvullend op het gebruik van VITIS® Sensitive Tandpasta. 2x per dag spoelen gedurende 30 seconden met 15 ml.



VITIS® SENSITIVE
TANDPASTA

Actief hydroxyapatite	0,45%
Kaliumnitraat	5,00%
Provitamine B5	1,00%
Allantoïne	0,10%
Vitamine E	0,30%
Natriummonofluorofosfaat	1,10%, 1.450 ppm

Advies:

2x per dag poetsen met 1-2 cm tandpasta. De formule is werkzaam vanaf het eerste moment van gebruik.



VITIS® SENSITIVE
TANDENBORSTEL

- Voor reiniging bij gevoelige tanden en tandhalzen.
- Zachte en afgeronde borstelharen, uitermate geschikt voor het poetsen van gevoelige tanden.



anticaries



Voorkomt het ontstaan van cariës en beschermt tegen tanderosie

VITIS® ANTICARIES TANDPASTA

VITIS® Anticaries Tandpasta is veruit het meest geavanceerde product tegen cariës. Het eerste product dat tandglazuur beschermt en van binnenuit repareert, dankzij de innovatieve Dentaïd haprepair technologie®. Hydroxyapatite is een natuurlijk bestanddeel van tanden en kiezen en in de vorm van miniscule deeltjes integreert deze stof volledig met het tandoppervlak. Het zorgt voor:

- Versterking en remineralisering van het tandglazuur
- Herstel van onregelmatigheden en scheurtjes in het tandoppervlak.
- Een beschermende laag die bestand is tegen zuuraanvallen.

WERKING

VITIS anticaries tandpasta is speciaal ontwikkeld om het ontstaan van cariës op drie manieren tegen te gaan. Deze drievoudige werking herstelt, versterkt én helpt het tandglazuur te remineraliseren. Dit zorgt voor een uitstekende preventie van cariës en tevens beschermt het tegen tanderosie.

Actieve ingrediënten:

- Actief hydroxyapatite
- Xylitol
- Natriummonofluorofosfaat (Fluoride)



ADVIES

- Dagelijks gebruik
- 2x per dag poetsen met 1-2 cm tandpasta of na elke maaltijd.
- Met aangename, zachte mintsmaak.



VITIS® ANTICARIES TANDPASTA

Actief hydroxyapatiet	0,45%
Xylitol	10%
Natriummonofluorofosfaat	1,10%
	1.450 ppm

Advies:

- 2x per dag poetsen met 1-2 cm tandpasta.



orthodontic



Verzorging en bescherming voor beugeldragers (vaste en uitneembare beugels).

VITIS® ORTHODONTIC

Door de aanwezigheid van orthodontische apparatuur in de mond is goed poetsen lastig. Daardoor kunnen cariës, tandvleesproblemen en slechte adem ontstaan. Ook ontstaan vaak irritaties in de mond door de aanwezigheid van de vaste apparatuur. VITIS® Orthodontic gaat tandplaque tegen, verbetert de conditie van het tandvlees en vermindert irritaties van de zachte weefsels door de aanwezigheid van de vaste apparatuur.

WERKING

- Remt de vorming van tandplaque
- Versterkt het tandglazuur
- Gaat cariësvorming tegen
- Houdt het tandvlees gezond
- Beschermst tegen incidentele irritatie veroorzaakt door de aanwezigheid van apparatuur
- Voorkomt slechte adem
- Helpt de apparatuur schoon te houden

ADVIES

- Dagelijks gebruik
- 2x per dag poetsen en spoelen ter verbetering van de mondhygiëne en verzorging van de mond bij orthodontie.
- Combineer voor een optimaal resultaat VITIS® Orthodontic Tandpasta met VITIS® Orthodontic Mondspoelmiddel.

ALCOHOL VRIJ



VITIS® ORTHODONTIC MONDSPOELMIDDEL

Cetylpyridinium Chloride	0,05%
Allantoïne	0,10%
Aloë Vera	0,05%
Natriumfluoride	0,05%
	226 ppm

Advies:

- 2x per dag spoelen gedurende 30 seconden met 15 ml.
- Niet met water naspoelen.



VITIS® ORTHODONTIC TANDPASTA

Cetylpyridinium Chloride	0,05%
Allantoïne	0,10%
Aloë Vera	0,126%
Natriumfluoride	0,321%
	1.450 ppm

Advies:

- 2x per dag poetsen met 1-2 cm tandpasta.

MD

VITIS® ORTHODONTIC WAX

Hydrogenated Mycrocrystalline Wax	
Paraffin	
White Mineral Oil	

Advies:

Regelmatig een kleine hoeveelheid wax aanbrengen op delen van de orthodontische apparatuur die irritatie van de zachte weefsels veroorzaken.



VITIS® ORTHODONTIC ACCESS TANDENBORSTEL

- Kleine en flexibele borstelkop speciaal geïndiceerd voor een effectieve reiniging bij orthodontische behandelingen.
- V-vormige borstelkop voor een goede reiniging van en rond de brackets.



+0
jaar



baby



Verlicht ongemak
tijdens het doorkomen
van de eerste tandjes

VITIS BABY GEL-BALSEM, VOOR TANDEN EN TANDVLEES

- Verlicht ongemak tijdens de doorbraak van de eerste tandjes.
- Verzorgt en kalmeert het tandvlees.
- Lage schuringswaarde, zeer veilig voor het tandglazuur.

WERKING

- Kalmeert de zachte weefsels.
- Beschermst, verzorgt en versterkt het tandvlees.
- Beschermst het mondslijmvlies.
- Verfrist de mond en kalmeert bij ongemak veroorzaakt door het doorbreken van de tandjes.
- Handzame, kleine tube om de gel-balsem op elk gewenst moment te kunnen gebruiken.
- Gemakkelijk te openen dop.



VITIS BABY GEL-BALSEM

Kamille-extract	0,05%
Pantenol (provitamine B5)	1,00%
Allantoïne	0,10%
Kalium glycyrrhizinaat	0,35%
Xylitol	1,00%

Neutrale smaak
Zonder gluten en parabenen

VITIS BABY TANDENBORSTEL

Zachte reiniging van de eerste tandjes en het tandvlees.



Extra zachte borstelharen om de eerste tandjes en het tandvlees van de baby te ontzien.



Kleine, ronde borstelkop om in één keer alle vlakken van een tandje te kunnen poetsen.

Smalle nek om zonder ongemak de gehele mondholte te kunnen bereiken.

Speciaal ontwikkeld voor het poetsen van een babymondje door een volwassene.

Korte borstelharen aangepast aan de mond van een baby.



VITIS BABY TANDVLEES- MASSAGEBORSTELTJE

VITIS BABY TANDENBORSTEL

- Voor dagelijks gebruik om de eerste tandjes te reinigen en het tandvlees te masseren
- Speciaal ontwikkeld voor het poetsen van een babymondje door een volwassene



kids



VANAF DE
1^E TANDJES

+6
maanden

Voor de optimale
verzorging van
het melk- en
wisselgebit



Tijdens de eerste levensjaren vinden er in de mond grote veranderingen plaats. In elke levensfase heeft de mond een specifieke verzorging nodig zodat de mondholte zich in elke fase op een juiste manier kan ontwikkelen.

HET JONGE GEBIT

- is een belangrijke basis voor de gezonde vorming van het permanente gebit. Zo worden de wortels van het melkgebit door het lichaam geabsorbeerd en worden de mineralen gebruikt voor de vorming van het permanente gebit.
- speelt een essentiële rol bij het leren spreken.

- is nodig om op voedsel te bijten, fijn te maken waardoor de spijsvertering kan beginnen.
- bevordert de ontwikkeling van de kaak.

2 - 6 JAAR MELKTANDEN

- Cariës is het belangrijkste probleem in de mond.
- Start met het aanleren van een goede dagelijkse mondverzorging.

6 - 12 JAAR WISSELEN NAAR EEN PERMANENT GEBIT

- Cariës is het belangrijkste probleem in de mond.
- Doorkomende tanden kunnen tandvleesontsteking veroorzaken.



junior



+6
jaar

VITIS KIDS TANDGEL VANAF DE 1^E TANDJES

- Voorkomt cariës (gaatjes) in het melkgebit.
- Bevat natriumfluoride (1.000 ppm).
- Met xylitol.
- Kindvriendelijke kersen-smaak.

VITIS JUNIOR TANDGEL VANAF 6 JAAR

- Voorkomt cariës in het gebit.
- Bevat natriumfluoride (1.450 ppm).
- Met provitamine B5, beschermt en verzorgt het tandvlees.
- Met xylitol.
- Kindvriendelijke tuttifrutti-smaak.



VITIS® KIDS TANDPASTA

Vanaf de 1e tandjes

Xylitol
Kersensmaak
Natriumfluoride 1.000 ppm
Zonder SLS
Zonder munt/mint

Advies:

- 2x per dag poetsen
- Hoeveelheid tandpasta:
0-2 jaar: ter grootte van een rijstkorrel
2-6 jaar: ter grootte van een erwten



VITIS KIDS TANDENBORSTEL

- Borsteltje voor dagelijks gebruik om het melkgebit te poetsen
- De kleine borstelkop met speciale zachte Tynex® borstelhaartjes en afgerond uiteinde zorgt voor een betere precisie tijdens het poetsen
- Smalle hals biedt toegang tot de gehele mondholte zonder dat het kind hier last van heeft
- Ergonomisch kindvriendelijk groot handvat met antislipgroeven



VITIS® JUNIOR TANDPASTA

Vanaf 6 jaar

Xylitol
Panthenol (Provitamine B5)
Tutti-frutti-smaak
Natriumfluoride 1.450 ppm
Zonder SLS
Zonder munt/mint

Advies:

- 2x per dag poetsen met 1-2 cm tandpasta.



VITIS JUNIOR TANDENBORSTEL

- Borsteltje voor dagelijks gebruik
- Kleine afgeronde borstelkop met zachte Tynex® borstelhaartjes
- Smalle hals biedt toegang tot de gehele mondholte zonder dat het kind hier last van heeft
- Ergonomisch en kindvriendelijk groot handvat met antislipgroeven



VITIS Tandенborstels

Borstellijn voor baby's en kinderen



VITIS BABY

Borsteltje voor dagelijks gebruik om de eerste tandjes te reinigen en het tandvlees te masseren. Speciaal ontwikkeld voor het poetsen van een babymondje door een volwassene.



VITIS KIDS

Borsteltje voor dagelijks gebruik om het melkgebit te poetsen. Gebruik vanaf de eerste tandjes. De kleine borstelkop met speciale zachte Tynex® borstelhaartjes en afgerond uiteinde zorgt voor een betere precisie tijdens het poetsen. De smalle hals biedt toegang tot de gehele mondholte zonder dat het kind hier last van heeft. Ergonomisch kindvriendelijk groot handvat met antislipgroeven.



VITIS JUNIOR

Borsteltje voor dagelijks gebruik vanaf 6 jaar. Kleine afgeronde borstelkop met zachte Tynex® borstelhaartjes. De smalle hals biedt toegang tot de gehele mondholte zonder dat het kind hier last van heeft. De VITIS Junior Tandенborstel heeft een speciaal aangepast ergonomisch kindvriendelijk groot handvat met antislipgroeven.

Borstellijn voor dagelijkse mondverzorging



VITIS GEZOND TANDVLEES ACCESS

Tandenborstel voor dagelijks gebruik. De zachte en afgeronde borstelharen zijn uitermate geschikt voor reiniging bij gevoelig en/of ontstoken tandvlees. De kleine borstelkop maakt reiniging achter in de mond gemakkelijk.



VITIS SENSITIVE

Tandenborstel voor reiniging bij gevoelige tanden en tandhalzen. Zachte en afgeronde borstelharen, uitermate geschikt voor het poetsen van gevoelige tanden.



VITIS MEDIUM

Tandenborstel voor dagelijks gebruik met medium harde filamenten. De middelsterke Tynex® borstelharen zijn van hoogwaardige kwaliteit en zorgen voor een effectieve reiniging van de tanden. De flexibele hals voorkomt dat er teveel druk wordt uitgeoefend op tanden en tandvlees.

Gespecialiseerde borstellijn voor specifiek mondzorg



VITIS SURGICAL

Tandenborstel met zeer zachte borstelharen voor reiniging bij zeer gevoelig tandvlees o.a. na chirurgie, trauma, anug en anup.



VITIS MONOTIP

Geïndiceerd voor het reinigen van grotere interdentale ruimten als gevolg van o.a. het missen van één of meerdere elementen. Ook uitermate geschikt voor reiniging van de distale vlakken van de achterste molaren.



VITIS ORTHODONTIC ACCESS

Tandenborstel met kleine en flexibele borstelkop speciaal geïndiceerd voor een effectieve reiniging bij orthodontische behandelingen. De V-vormige borstelkop zorgt voor een goede reiniging van en rond de brackets.

Gespecialiseerde borstellijn voor een optimale mondhygiene rond implantaten



VITIS ANGULAR

Monotip borstelkop met zachte Tynex® borstelharen. Handvat met speciale hoek voor een optimale en patiëntvriendelijke reiniging van de moeilijk bereikbare linguale en palatinale zijden. Geschikt voor gebruik in de anterieure en posterieure zones van een mond met implantaten.



VITIS MONOTIP

Monotuft borsteltje met Tynex® borstelharen. Speciaal geïndiceerd om zeer kleine en moeilijk bereikbare plaatsen te reinigen waar een optimale mondhygiëne essentieel is zoals bij (solitair) geplaatste implantaten of implantaten met een stegconstructie.



VITIS SULCULAR

De zachte Tynex® borstelharen zijn in 2 smalle lineaire rijen op de borstelkop geplaatst. Speciaal geïndiceerd voor de reiniging van de gingiva rond tandheelkundige implantaten en de peri-implantaire sulcus.



Maat
M

EXTRA
STERK



Effectieve reiniging van de allerkleinste interdentale ruimten

VITIS® FLOSS EN VITIS® TAPE

Voor het reinigen van de allerkleinste interdentale ruimten waar het gebruik van interdentale borstels niet mogelijk is, is VITIS® Floss of VITIS® Tape zeer geschikt.

VITIS® Floss en VITIS® Tape verwijderen interdentale tandplaque en voedselresten en komen daarbij gemakkelijk onder de tandvleesrand, zelfs in zeer kleine interdentale ruimten.

- Voor het reinigen van de allerkleinste interdentale ruimten waar het gebruik van interdentale borstels niet mogelijk is.
- Verwijdert tandplaque en voedselresten
- Komt gemakkelijk onder de tandvleesrand, zelfs in zeer kleine interdentale ruimten.
- Doosje met venster zodat goed gezien kan worden wanneer het bijna op is.
- Uitermate sterk en rafelt niet.



VITIS® FLOSS




VITIS® TAPE

VITIS® FLEXIPICKS

Rubberen tandenstokers om gemakkelijk en snel tandplaque en voedselresten te verwijderen in de interdentale ruimten.

- Extra sterk
- Verkrijgbaar in maat M, conisch van model zodat het past in meerdere maten interdentale ruimten
- Makkelijk in gebruik
- Zacht voor het tandvlees
- Handige, recycleerbare travelcase: altijd een interdentaal hulpmiddel op zak

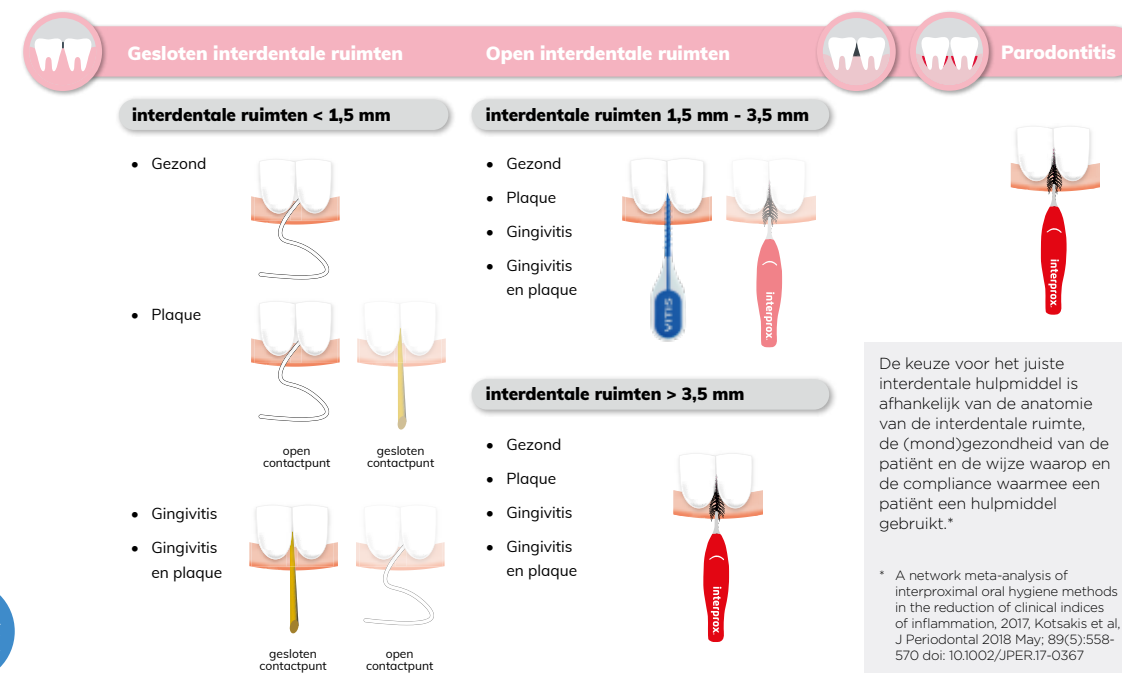

De keuze voor het juiste interdentale hulpmiddel is afhankelijk van de anatomie van de interdentale ruimte, de (mond)gezondheid van de patiënt en de wijze waarop en de compliance waarmee een patiënt een hulpmiddel gebruikt.*

* A network meta-analysis of interproximal oral hygiene methods in the reduction of clinical indices of inflammation, 2017; Kotsakis et al. J Periodontol 2018 May; 89(5):558-570 doi: 10.1002/JPER.17-0367



VITIS

droge mond

ALCOHOL
VRIJ

Maximale hydratatie
en verzorging bij
droge-mond-klachten

VITIS DROGE MOND

Droge-mond-klachten komen veelvuldig voor als gevolg van gebruik van bepaalde medicijnen. Maar ook het syndroom van Sjögren, reumatische aandoeningen, chemo- en bestralingstherapie en chronische stress kunnen Xerostomie veroorzaken. Door gebrek aan speeksel in de mond kunnen problemen ontstaan zoals cariës, ontstoken tandvlees, irritaties van de zachte weefsels, droge lippen en gescheurde mondhoeken. Ook ervaren deze patiënten problemen met eten en spreken. De producten van VITIS Droge Mond verzorgen en beschermen de mond en verlichten de droge-mond-klachten.

WERKING

De VITIS Droge Mond producten verlichten droge-mond-klachten door maximale hydratatie.

De verzorgende bestanddelen beschermen de zachte weefsels en gaan irritaties tegen.

De producten bevatten Natriumfluoride om het tandglazuur te versterken. De producten hebben een zeer milde maar aangename smaak en bevatten geen alcohol.

ADVIES

- Gebruik VITIS Droge Mond Tandpasta en VITIS Droge Mond Mondspoelmiddel 2x per dag.
- Voor droge-mond-klachten gedurende de nacht is VITIS Droge Mond Gel zeer geschikt.
- VITIS Droge Mond Gel met de vinger op de tong aanbrengen en vervolgens de gel met de tong door de mondholte verspreiden.
- Gebruik VITIS Droge Mond Spray om direct de speekselproductie te stimuleren. Spray 3 tot 4x in de mond op die momenten waar nodig.



VITIS DROGE MOND MONDSPOELMIDDEL

Betaïne	1,33%
Xylitol	3,30%
Allantoïne	0,10%
Natriumfluoride	0,05%
	226 ppm

Advies:
Gebruik 2 à 3 x per dag, gedurende 30 seconden spoelen met 15 ml. Daarna uitspuwen.

ALCOHOL
VRIJ



VITIS DROGE MOND TANDPASTA

Betaïne	4,00%
Xylitol	10%
Allantoïne	0,10%
Natriumfluoride	0,32%
	1.450 ppm
Zonder SLS	

Advies:
Gebruik dagelijks, 2 à 3 x per dag gebruiken als tandpasta.



VITIS DROGE MOND GEL

Betaïne	1,00%
Xylitol	10%
Aloë Vera	0,05%
Natriumfluoride	0,0033%/15 ppm

Zonder menthol en SLS

Advies:
Gebruik dagelijks, met name voor de nacht. Breng een hoeveelheid ter grootte van een erwt aan op de tong en verspreid de gel met de tong goed door de mondholte.



VITIS DROGE MOND MONDSPRAY

Xylitol	10%
Appelzuur	1,00%
Natriumfluoride	0,05%
	226 ppm

Zonder Menthol

Advies:
Gebruik dagelijks op die momenten waar nodig om direct de speekselhoeveelheid te stimuleren.



Voor een effectieve en complete behandeling
van slechte adem



HALITA

Eén op de 5 mensen heeft last van slechte adem. Dit probleem kan veroorzaakt worden door ontstoken tandvlees of slechte mondhygiëne maar veel vaker wordt dit veroorzaakt door plaque en bacteriën op de tongrug.

Bij het uitsteken van de tong wordt een wit/gele aanslag zichtbaar. Bepaalde bacteriën in deze plaque produceren zogenaemde vluchtige zwavelgassen die de slechte adem veroorzaken. De producten van Halita verminderen de slechte adem snel en effectief.

WERKING

Halita vermindert slechte-adem-klachten en gaat de productie van vluchtige zwavelgassen tegen.

HALITA TONGREINIGER:

Verwijdert plaque en bacteriën van de tong. De gladde kant van de tongreiniger een aantal keren over de tongrug halen (niet teveel kracht uitoefenen). Eventueel de tongreiniger omdraaien en de fissuur in het midden van de tong schoonmaken. Afhankelijk van de plaquevorming 1 of 2x per dag gebruiken.



ALCOHOL
VRIJ



HALITA MONDSPOELMIDDEL

Chloorhexidine Digluconaat	0,05%
Cetylpyridinium Chloride	0,05%
Zink Lactaat	0,14%

Advies:
2x per dag ('s ochtends en 's avonds) gedurende 1 minuut gorgelen met 15 ml. De tong dient tijdens het gorgelen zover mogelijk uitgestoken te worden.



HALITA TANDPASTA

Cetylpyridinium Chloride	0,05%
Zink Lactaat	0,14%
Xylitol	10%
Natriumfluoride	0,321%
	1.450 ppm

Bevat géén Chloorhexidine

Advies:
1 à 2x per dag na het tongreinigen poetsen met Halita Tandpasta.

ALCOHOL
VRIJ



HALITA MONDSPRAY FORTE

Chloorhexidine Digluconaat	0,05%
Cetylpyridinium Chloride	0,05%
Zink Lactaat	0,14%

Advies:
Per keer 4 tot 6 pufjes op de tong en in de mond sprayen.



De pH-veilige
Natriumfluoride

FLUOR•AID

Cariës en tanderosie kunnen met name bij kinderen en jongvolwassenen optreden. Aanpassing van het voedingspatroon is belangrijk. Aanvullend gebruik van Fluor•Aid Natriumfluoride Mondspoeling is aan te bevelen.

WERKING

Fluor•Aid Natriumfluoride Mondspoelmiddel voorkomt cariës en tanderosie en versterkt het tandglazuur. In geval van gevoelige tanden draagt het mondspoelmiddel bij aan de vermindering van tandgevoeligheid. Fluor•Aid is mild van smaak, bevat geen alcohol of kleurstoffen en is daardoor uitermate geschikt voor zowel volwassenen als kinderen (vanaf 6 jaar). Met frisse mintsmaak en veilig in gebruik.

ADVIES

- Gebruik 1 à 2x per dag na het tandenpoetsen én voor het slapen gaan
- Spoel met 10 à 15 ml Fluor•Aid mondspoelmiddel
- Gedurende 1 à 2 minuten spoelen daarna uitspuwen.
- Bij voorkeur 15 minuten na het spoelen met Fluor•Aid niet eten of drinken.



FLUOR•AID
MONDSPOELMIDDEL

Xylitol 1,00%
Natriumfluoride 0,05% 226 ppm
Bevat geen kleurstoffen

Kits & etuis



PERIO•AID SURGICAL ETUI

- Perio•Aid 0,12% Mondspoelmiddel 30 ml
- VITIS Whitening Tandpasta 15 ml
- VITIS Surgical Tandborstel
- Cold Pack
- Patiëntfolder
- Etui



PERIO•AID SURGICAL KIT

- Perio•Aid 0,12% Mondspoelmiddel 30 ml
- VITIS Whitening Tandpasta 15 ml
- VITIS Surgical Tandborstel
- Cold Pack
- Kit



VITIS ORTHODONTIC KIT LARGE

- VITIS Orthodontic Mondspoeling 30 ml
- VITIS Orthodontic Tandpasta 15 ml
- VITIS Orthodontic Access Tandborstel
- VITIS Orthodontic Wax doosje
- Patiëntfolder
- 2 Interprox interdentaal borsteltjes
- Interprox Gel 3,5 ml



VITIS ORTHODONTIC KIT SMALL

- VITIS Orthodontic Mondspoeling 30 ml
- VITIS Orthodontic Tandpasta 15 ml
- VITIS Orthodontic Access Tandborstel
- VITIS Orthodontic Wax doosje
- Patiëntfolder
- 1 Interprox interdentaal borsteltje



VITIS KIDS LUXE ETUI

- VITIS Kids Tandborstel
- VITIS Kids Tandpasta 15 ml
- Patiëntfolder
- Etui
- Zandloper
- Gum



VITIS JUNIOR LUXE ETUI

- VITIS Junior Tandborstel
- VITIS Junior Tandpasta 15 ml
- Patiëntfolder
- Etui
- Zandloper
- Gum

BESTELINFORMATIE BELGIE

Plaats uw bestelling gemakkelijk en snel op onze website **www.dentaid.be**.

Voor een directe hyperlink naar de website scan onderstaande QR code.

In de webshop vindt u ons volledige productassortiment als ook diverse gevulde kits, etuis en productsamples. U vindt hier de actuele prijzen en eventuele (staffel)kortingen.

Customer Service:

Voor vragen kunt u contact opnemen met onze Customer Service via info@dentaid.be of telefonisch op +31 (0)30-6343154.

